



Schiebler

Bequem Schuhhaus
FELTEN

Bequem- und Gesundheitsschuhe für lose Einlagen
Komfortschuhe für Beruf und Alltag
Trierer-Straße 14, 66706 Perl, Tel. 0 68 67 / 9 33 93

Verbandschuh

(für Langzeitanwendung)



Ein Verbandschuh zur Lösung vielseitiger Probleme. Durch spezielle Formgebung, Einsatz weicher und anschmiegsamer Materialien paßt sich unser Verbandschuh jeder Fußform an, und ist angenehm zu tragen.

Anwendungsbereiche:

- krankhafte Gewebeveränderungen
- mangelnde Blutzirkulation
- Fußveränderungen aufgrund verschiedener Krankheitsbilder
- präoperativer Einsatz zur allg. Verbesserung des Fußzustandes
- postoperativer Einsatz bei Amputationen, Ödembildung
- Der Verbandschuh kann problemlos über Bandagen oder bei Gipsverbänden getragen werden


Schuhgröße 36 – 47




Handhabung:



Klettverschlüsse und Reißverschluß am Fersenrücken öffnen und Fuß bequem platzieren.

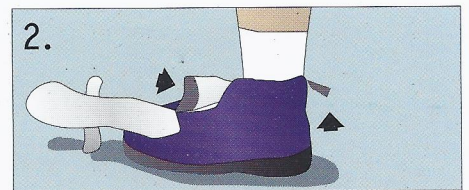

Reißverschluß und Klettverschluß über dem Spann schließen, so daß eine optimale Sitzposition des Fußes erzielt wird.

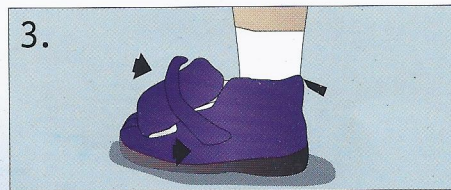

Vorderlasche mittig über dem Fuß schließen, ebenso seitliche Klettverschlüsse fixieren. Späteres An- und Ausziehen durch Öffnen des hinteren Reißverschlusses ohne zusätzliches Öffnen der Klettverschlüsse.

Pflegehinweise:

Wir empfehlen, den Verbandschuh mittels Handwäsche mit handwarmem Wasser unter Verwendung eines Feinwaschmittels zu reinigen (dabei Klettverschluß schließen). Bei Trocknung unbedingt Hitze vermeiden und an der Luft trocknen. Wir empfehlen Schiebler-2x-Spezial-Waschmittel für besonders gewebeschonende Reinigung.



Schiebler